

Комфорт и естественность для вашего пациента – прибыльно и престижно для вас.

Наименование продукта:	flexi N512
Цвет:	Натурально розовый / Бледно - розовый
Упаковка:	Россыпью, 100 г продукта или пять средних / больших наполненных алюминиевых контейнеров, диаметром 25 / 28мм
Характеристика:	Полиамидная смола для использования методом инъекционного литья, с добавлением высококачественных красителей в прозрачных оттенках. flexi N512 - гибкий, эластичный, очень эстетичный, освобожденный от мономеров, гипоаллергичный, легко полируемый.
Предназначение использования:	Медицинский продукт 1 класса в соответствии с MDD 93/42EEC Для производства различных типов частичных съёмных зубных протезов в стоматологических лабораториях. Материал предусмотрен для использования со всеми моделями аппаратов технологии инъекционного литья.
Параметры использования:	- Температура плавления: 250 °C - Время перед инъекцией и время нагрева: Таймер 1: 11 минут Таймер 2: 2 минуты - Поддержание давления во время охлаждения: Таймер 3: 2 минуты - Инжекционное давление: 8 бар Для подробного описания использования материала flexi N512 с аппаратом EVOX V8 фирмы EVOLON смотрите Техническое Руководство машины EVOX V8. Для использования с EVOX V8 Программа 04. Для корректного использования материала flexi N512 и полного комплекта инъекционной технологии фирмы EVOLON рекомендован курс обучения технологии на базе фирмы EVOLON, или на базе авторизованных дилеров EVOLON.
Содержание изделия из flexi-N512:	Рекомендовано очищать протезы flexi N512 в растворе концентрированного порошка D-Cleaner 306 / продукция фирмы EVOLON /.

Важная информация по безопасности

Ингаляции: избегайте вдыхание паров вследствие нагревания материала. В случае ингаляции, немедленно выйти на свежий воздух. Оценить необходимость искусственного дыхания и обеспечить немедленное медицинское вмешательство.
Контакт с глазами: немедленно промойте глаза проточной водой в течение по крайней мере 15 минут. Если раздражение развивается, обращайтесь немедленно за медицинской помощью.
Контакт с кожей: если контакт происходит, кожу немедленно промыть холодной водой. Не пытайтесь удалить материал с кожи или с загрязненной одежды, так как возможны повреждения и разрывы. Носить защитные перчатки. В мерах профилактики должен быть легко доступен душ.

**ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
В СУХОМ, ЧИСТОМ И ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОМ МЕСТЕ.
НЕ ЭКСПОНИРОВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА.
ДЕРЖИТЕ ВДАЛЕКЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И ВОСПАЛЯЕМЫХ ВЕЩЕСТВ.
ДЕРЖИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.**

   Только для профессионального использования

Уважаемые партнёры,

Вы выбрали высококачественный продукт фирмы EVOLON Ltd.

Благодарим вас за доверие к нашим материалам и за ваш выбор в пользу фирмы EVOLON.

Для максимальной эффективности процесса производства и высоких эстетических результатов мы рекомендуем использование нашего аппарата для инъекционного литья EVOX V8, а так же комплекс всего спектра успешных материалов инъекционной технологии, специально разработанных для эффективного совместного использования. Вы извлечете реальную пользу из обширного опыта, накопленного фирмой EVOLON в процессе разработки и внедрения набора продукции этой системы. В случаи возникновения дополнительных вопросов по технологии и комплекту материалов, просим обратиться к вашему местному представителю фирмы EVOLON за дополнительной информацией и подробностями. EVOLON предоставляет всестороннюю техническую поддержку. Всегда к вашим услугам.

С уважением,
Отдел поддержки и обслуживания
компании EVOLON

Важное примечание: Практическое использование материала пользователем без какого-либо контроля со стороны Компании, следовательно, попадает под ответственность самого пользователя. Любая ответственность за нанесённый вред или понесённые убытки ограничивается стоимостью продукции, представленной Компанией и использованной пользователем.